

Triamin Disinfection

洗浄と除菌をワンステップでこなす
アルコールを使っていない使い捨てワイプ



item no: 81133

ワイプサイズ: 20 x 28cm 厚さ約 0.5mm

ウェットワイプ Triamin は、特殊な構造をもつ繊維が対象表面の細菌を取り除き、さらに高い効力をもつ除菌成分を含ませたディスポーザブルのワイプです。

ウェットワイプ Triamin の洗浄・除菌能力は、医療分野等で使われる除菌製品への欧州統一規格（EN 規格）に則った試験を実施し、さらにロベルトコッホ研究所（RKI）及びドイツウイルス疾病管理協会（DVG）策定のガイドライン要件に基づく試験も行っている製品です。

テスト菌種	テスト EN 規格	対象菌の 露出時間（分）	対数減少値	合格基準値
Bacteria: Staphylococcus aureus	EN13727	1	>5,1	>5
	EN13697	2	>4,1	>4
		5	>6,8	>4
Bacteria: Enterococcus hirae	EN13727	5	>6,7	>5
	EN13697	2	>4,12	>4
		5	>6,7	>4
Bacteria: Escherichia coli	EN13727	1	>5,1	>5
	EN13697	2	>3,0	>4
		5	>5,9	>4
Bacteria: Pseudomonas aeruginosa	EN13727	1	>5,1	>5
	EN13697	2	>5,3	>4
		5	>5,3	>4
Yeast fungus: Candida albicans	EN13624	1	>4,5	>4
	EN13697	5	>5,4	>3

製品の特徴

- ・消毒プロセスの一環、手術器具の前洗浄などに従来の酵素クリーナー及び洗剤の効率的な代替品としてお使いいただけます。
- ・HIV および B 型・C 型肝炎などの繁殖性細菌に対して殺菌性があります。薬剤は最大で 5 分とどまりますので、2 分以内に死滅する殆どの繁殖性細菌に有効です。
- ・使用後の水によるリンスを必要としません。低発泡ですので不規則な表面をもつ機器類にも使用できます。
- ・作業対象物の材質を変色させるなどの影響はありません。
- ・pH8~9。無香料、無着色です。
- ・浸水性のある手術器具等には使用しないでください。
- ・手袋をしてお使いください。
- ・開封後 30 日以内に使いきってください。